

Placering i komfortrollstol



I denna vägledning finner du exempel på hur du använder Spilerdug i förbindelse med att placera en person i komfortrollstol. Du kan också se videon om ämnet på våran hemmesida.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.se


Placering i komfortrollstol med taklyft



Vippa stolen, så lutningen på stolsryggen er den samme som personens rygg, når han/hon sitter i seglet.



Placera 2 stycken vikta Spilerdug i komfortrollstolen. Vikningarna skall vändas in mot mitten och Spilerdugen skall placeras en handsbredd (ca. 10 cm) från framkanten och ca. 15 cm upp på stolsryggen.

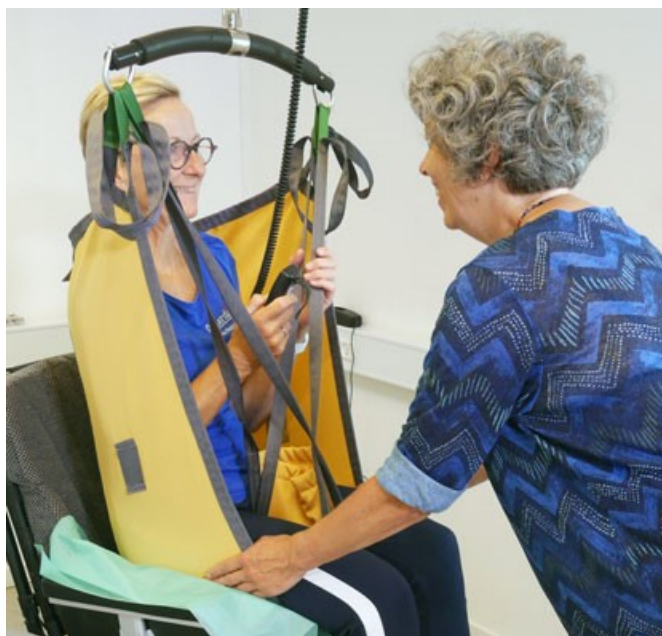

Lyft personen ned till lite över sitsen.

För in personen in mot stolsryggen och placera.

Beroende på hur mycket styrning det skall till för korrekt placering, kan du antingen:

Hålla om lyftselens kanter ner vid personens lår.



eller:

Hålla på personens knä.



eller:

Håll omkring personens höfter.

Med det här greppet kan du justera den mest precisa placering.

Ta bort bendelarna



Start med att vika bendelen nedåt och glid det hörnet som är närmast stolsryggen in under låret.

För därefter bendelen in under knäveckan.



OBS: Det är viktigt att hela tiden ha styr på var bendelen är, så du är säker på att få fatt i den rätta.

Dra diagonalt bakåt i den bendelen som är närmast stolsryggen.



Dra bendelen helt tillbaka till stolsryggen.



Ta bort Spilerdugen genom att dra i nedersta lagret, diagonalt bakåt.

Ta bort lyftselen manuellt



Luta stolen fram till upprest.

Be personen luta sig fram.

För att skapa trygghet kan du placera en kudde eller liknande i knät.

Dra bändelarna helt tillbaka mot stolsryggen.



Dra bort lyftselen med båda händer.



Alternativt:

Placera personen nära intill sänggrinden, sänggavlen eller liknande. Be personen hålla fast med båda händerna.



Dra rullstolen bakåt medan personen håller kvar greppet.

Nu skapas det luft mellan rygg och stolsryggen.

Variationerna kan användas både för att placera och ta bort lyftselen.

Fjernelse af sejlet med loftlift



När personen inte kan luta sig fram.

Vik Spilerdug på mitten och vik 3-4 dragspelsvikningar, börja ifrån den ände med vikningen.

Använd ett stycke som är bredare än rullstolen. Det gör det lättare att placera och ta bort.



Fäst Spilerdugen mellan lyftselen och personens rygg - med dragspels-vikningarna mot lyftselen.

Be personen luta sig så det skapas luft till att placera Spilerdugen.

Placera din hand i den yttersta dragspelsvikningen och glid Spilerdugen ned.

Gör det samma den andra sidan.

Kroka på både övre och nedre öglor på lyftbygeln , så slipper du att ben- delarna fastnar i det ena eller det andra.



Höj lyften, så lyftselen tas bort utan att dra på kläderna eller hud.

Ta bort Spilerdugen genom att ta tag i vikningen och dra sedan diagonalt.



Du kan hitta ytterligare inspiration på vårans hemsida, tex. videor och vägledningar : "Längre tillbaka i rullstoll" och "Lyftsele på och av i rullstol".



Spileraug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.
" (rev 001)

