

Placera lyftsele mellan 2 lager Spilerdug



I denna vägledning visar vi, hur du kan placera en lyftsele mellan 2 stycken Spilerdug under en person i rygläge, utan vändning.

Vi visar flera exempel i vägledningen "lyftsele på i säng med Spiler+" och du kan också se videor med ämnet.

Det hittar du på vår hemsida www.spilerdug.se

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk/se

Placera de 2 stycken spilerdug så det är 10 cm. upp vid huvudgavel. Läggt lyftselen på personens ben med baksidan nedåt och bendelarna mot huvudet. Se bilder på

första sidan



För den ena bendelaren mellan de 2 lager Spilerdug - under kudden och helt uppe vid gaveln—och för över bendelaren till kollega.



Kollegan tar emot bendelaren och **drar långsamt över**

Medan



du med platt hand fortsätter att föra lyftselen in under kudden. Håll i det översta lagret Spilerdug, så personen inte glider med.



För lyftselen tills den är centrerad. Kolla det innan ni går vidare.



Om ni behöver korrigera, kan ni dra lyftselen mellan de 2 lagren Spilerdug.

När en drar så håller kollegan i det översta lagret Spilerdug.



Vik in de översta öglorna in under lyftselen,



Dra lugnt och i madrassnivå i båda bendelarna samtidigt.

Se till att lyftselen ligger där den skall innan ni går vidare.




Placera bendelarna genom att föra dem med platt hand in vid knävecket - mellan de 2 lagren Spilerdug.



Kollegan tar emot bendelen och **drar lungt** tills att bendelen är på plats.

Fortsatt på andra sidan och korsa bendelarna.

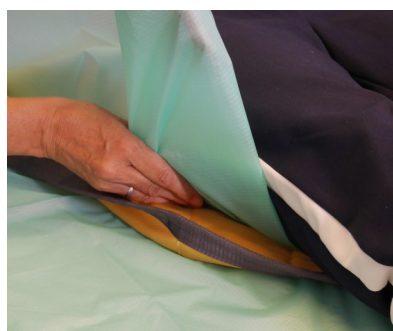

Ta bort det översta stycket Spilerdug helt eller delvis genom att vika det nedåt i båda sidor och skiftas att dra bitvis upp mot huvudgaveln.



Ställ in sängen i "hjärtläge" knädelen vinklad innan du kopplar på lyftbygel.

OBS: Det är lätt att posionera personen i rullstol och ta bort lyftselen, om du tar bort spilerdugen först när personen är förflyttad till rullstolen.



Spilerdug er CE-mærket i overensstemmelse med Medicinsk Direktiv 93/42/EC og lever op til standard DS/EN 12182 2002-07-08 4. udgave.

"Placere sejl mellem 2 stykker spilerdug" (rev 001)

