



Kör rullbordet med röntgenplattan till britsen och lås det.

Ställ ev. in britsen så det är lite lägre än röntgenplattan på rullbordet.

Placera Spilerdugen

—vikt 1/3— med kortaste sidan uppåt och vikningen mot röntgenplattan.



Glid sakta över röntgenplattan på britsen.



Håll i ett av Spilerdugs hörnen i det nedersta lagret.



Gå baklänges och längs med röntgenbritsen— så glider spilerdugen lätt väck och röntgenplattan flyttar sig inte.

När plattan ska tas bort



Kör rullebordet till röntgenbritsen och lås det.

Ställ ev. in britsen så den är lite högre än rullebordet.

Placera Spilerdugen

—vikt 1/3—med kortaste sidan uppåt och vikningen mot röntgenplattan.



Glid ev. in flikar av Spilerdugen in under Röntgenplattan i varje ände—så spilerdugen inte glider bort i förtid.



Glid röntgenplattan sakta över på rullebordet.



Ta bort Spilerdugen—som beskrivet—före rullebordet körs bort.



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.

