

Ta på lyftsele mellan två lager Spilerdug i rullstol



Personer som har behov av att förflyttas med lyft har oftast inte resurser till att luta sig framåt eller lyfta benen, när selen skall appliceras eller tas bort.

I denna vägledning ger vi exempel på, hur du kan använda Spilerdug för att underlätta arbetet och samtidigt se till att du inte drar i personens hud eller kläder.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.dk



Placera selen med utsidan neråt på ett vikt stycke Spilerdug.

Bendelarna är vikta mot insidan



Vik ett stycke Spilerdug

(t.ex. 150 x 100)



Låt personen rotera överkroppen, så att det skapas plats bakom ryggen i ena sidan. Låt ev. en kollega hjälpa till med rotationen.

Fäst nu Spilerdugens vikning mellan rullstolen och personens rygg.



Placera handen i vikningen, och glid varsamt ner Spilerdugen - MEN BARA till byxlinningen.



Gör samma sak på motsatt sida. Kom ihåg rotation åt motsatt håll, när du byter sida.



Kolla första sidan igen, och se till att Spilerdugen ligger lika långt nere på båda sidorna.




Fatta tag om selen och Spilerdugen som på bilden.



Fäst båda delar mellan Spilerdugen och rullstolens rygg.

Nu finns det spilerdug på båda sidor om selen.

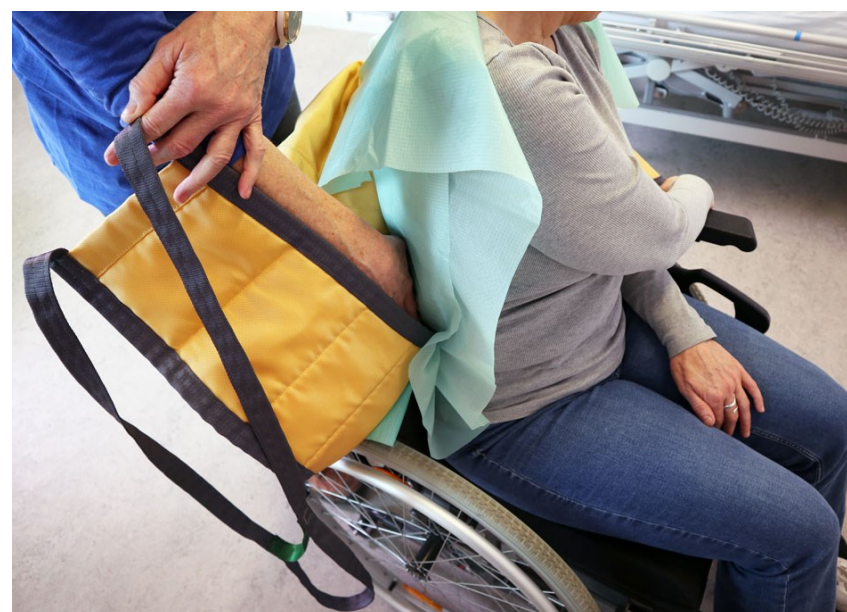

Placera handen i selens vikning, och glid ända ner till stolens säte.



Placera bendelen utmed låret.



Gör likadant i modsatt sida.

Kolla första sidan igen och se till att selen sitter så långt ner som möjligt.



Om du vill kontrollera, att selen sitter rätt:

Sätt dig framför personen på en pall.


Fatta tag i bendelarnas nedre/inre kant.

”Såga” försiktigt neråt så att bende-
larna glider ända ner till stolens
säte - även i mitten där bak.



Benstropparna

Vik ett stycke Spilerdug (75x100)

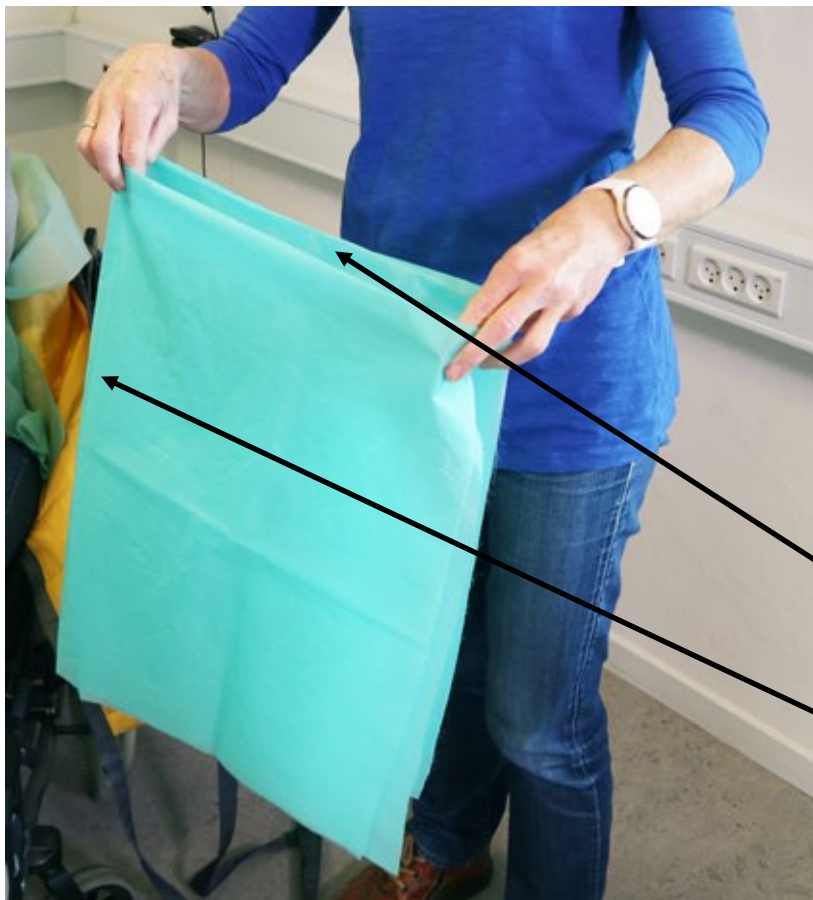

Vik därefter åt andra hållet, så du får 4 lager.

Dessa vikningar vänds mot stolsryggen

Denna vikningen vänds mot låret.



Fäst Spilerdugen under låret med de öppna sidorna framåt och utåt.

Spilerdugen måste ligga ända fram till knäleden—gärna lite längre.



Glid in Spilerdugen under låret.



För in bendelens yttersta stropp vid knävecket.

Ställ dig på andra sidan och fatta tag i stroppen.



Dra lungt benstroppen genom "Spilerdugstunneln" så vågrätt som möjligt - gärna med små sågrörelser. Se till att bendelen sitter korrekt innan du tar bort Spilerdugen.



Avlägsna Spilerdugen under låret genom att dra i det lagret, som är närmast bendelen.



Ta bort Spilerdugen som sitter mellan selen och personens rygg, genom att dra i lagret närmast selen.



För ena hörnet diagonalt till motsatt sida och dra loss Spilerdugen.



Spilerdug är CE-märkt enligt Medicinska förordning (EU) 2017/745 och uppfyller standard DS/EN 12182 2002-07-08

"Ta på lyftsele mellan två lager Spilerdug i rullstol" (rev 001)

