


Aleris Hamlet, Søborg

Höftoperation - från op-brits till säng

Vägledningen visar exempel på, hur man på operationsaavsnittet använder Spilerdug.

Uppmärksam på att andra team kan använda andra förflyttningsmetoder.

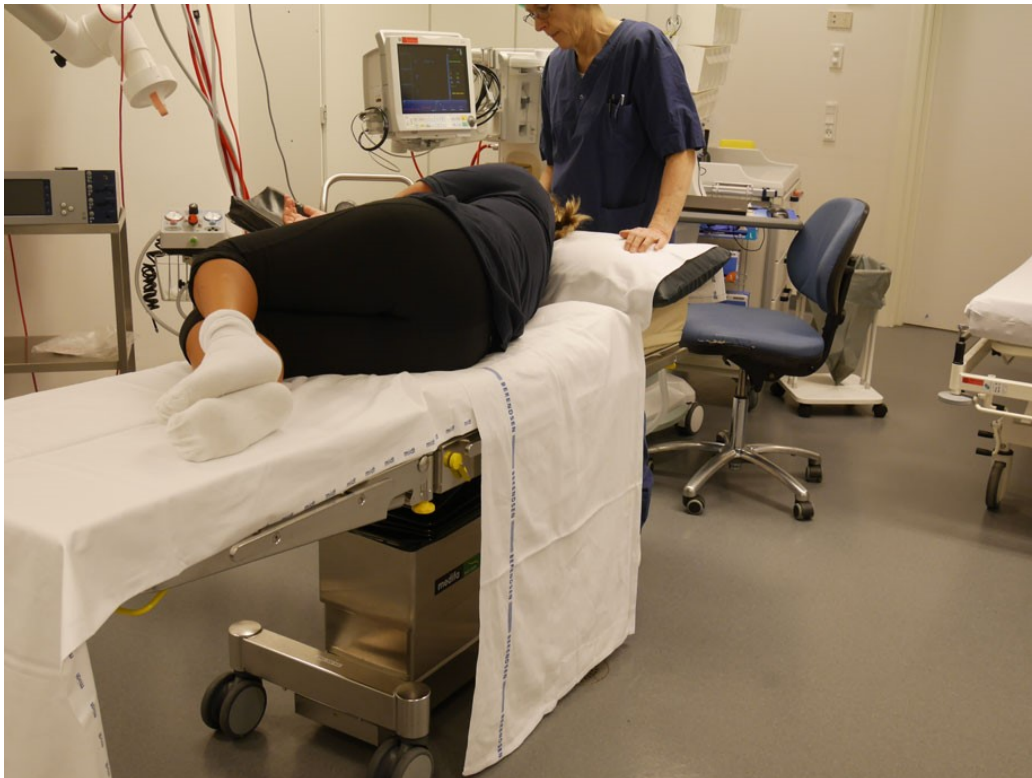

Innan pat kom på op-brits är ett vikt lakan placerat på tvärs med extra lakan ut till operatörens sida.

Pat ligger nu på sidan på op-britsen, som är höjd till passande arbeidshöjd.



Vik Spilerdugen 1/3 med den kortaste sidan upp mot kroppen.

Fäst Spilerdugen **under** det vikta lakanet mellan kropp och brits.

Spilerdugen ska nå från bakdelen till upp förbi skulderpartiet



Fäst på samma sätt ett vikt stycke Spilerdug, 1/3, mellan ben och brits.



Kör sängen till- lite lägre en op-britsen, och placera Spilerdugen ut på sängen.



Luta op-britsen lite mot sängen sängen.

Hälparen vid sängen tar tag i det vikta lakanet.



Pat vänds om på ryggen, samtidigt med att pat dras och skjivs över i sängen.



Räta patienten före Spilerdu-
gen tas bort, så han/hon ligger
mitt i sängen.



Vippa pat med hjälp av det vikta lakanet för att underlätta att ta bort Spilerdugen.



Ta bort Spilerdugen under benen och kroppen genom att dra i nedersta lagret, diagonalt. Skifta till motsatt kant, om det känns tungt.

Storlek på Spilerdug:

Till denna uppgift rekommenderas 2 stycken 100 x min. 175 cm



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.

