


Placera lyftsele utan vändning



Lägg lyftselen med bendelarna mot huvudet och baksidan mot brukarens kropp.

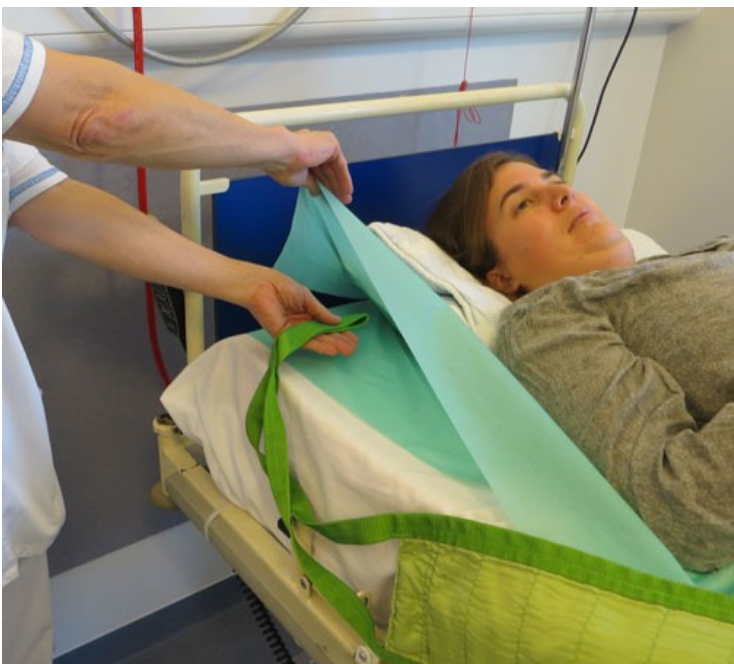

Glid den **ena bendelare** in mellan de 2 lager spilerdug och in under huvudet rakt över mot kollegan.



Kollegan hittar bendelaren och drar långsamt i bandet. Det måste vara ett rakt drag och inte ner mot brukarens skulder.

Brehms Spilerdug ApS

Tlf.:+45 57648351– E-mail: info@spilerdug.dk – www.spilerdug.se



Ni fortsätter med att glida och dra lugnt.

Den som glider lyftselen in, håller igen i det översta lagret spilerdug så brukaren inte glider med.

OBS. Det finns inget behov av att lyfta i kudden.



När lyftselen har kommit runt, kollar ni att den ligger mitt under brukaren innan ni drar den ned bakom brukarens rygg.



Kolla att bendelarna ligger mellan de 2 lager spilerdug innan ni drar lyftselen ned bakom brukarens rygg.



Dra lugnt i båda bändelarna samtidigt.

Dra längs med madrassen, inte upp mot brukarens rygg.

Höj eventuellt sängen




Kolla och korrigera lyftselen om den ligger snett.



Ni kan dra och skjuta på lyftselen mellan de 2 lager spilerdug.

Den som skjutar på får hålla igen på det översta lagret spilerdug.

Den som drar kan rulla lyftselen för att få ett större grepp.

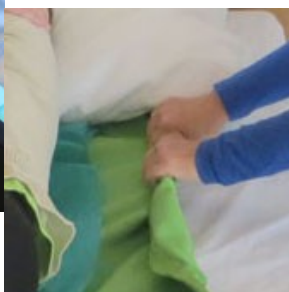



Glid bendelarna mellan de 2 lager spilerdug och in under brukarens lår och korsa de.



Ta bort det översta lagret spilerdug vid att vika det neråt mot lyftselen vid låren.

Vik det upp till brukarens skulder!

Är lyftselen svår att få bort och **ni bedömer att brukaren är stabil**, kan ni nu lyfta brukaren med spilerdug, det gör att lyftselen är lättare att ta bort.



Vill ni ta bort spilerdugen helt, drar ni enkelt i den vikning ni har gjort vid brukarens skulder.

CE



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.

”Placera lyftsela utan vändning”