


Knäplastikoperation—förflyttning på brits och till säng

Vägledningen visar exempel på, hur man på operationsavsnittet använder Spilerdug. Uppmärksam på att andra team kan använda andra förflyttningsmetoder.

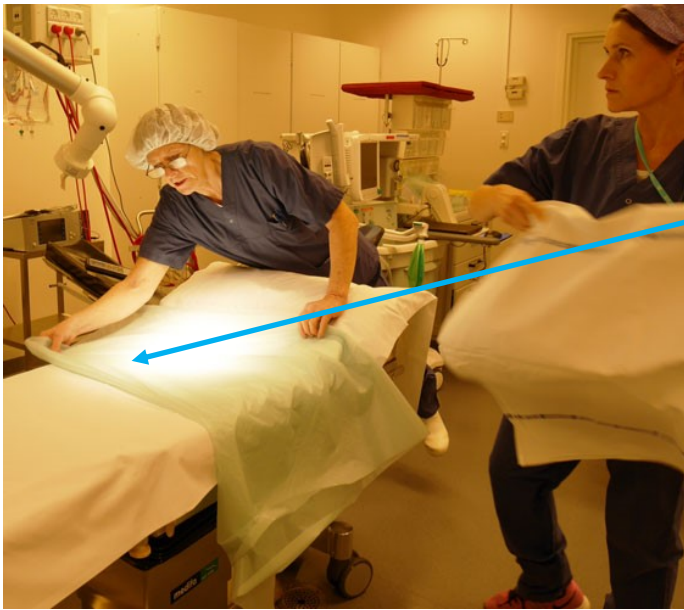

Vik Spilerdug på den korta sidan 2 gånger
Placera Spilerdugen på op-brits så vinkningen ligger "mitt" på op-brits och ändarna ligger upp över kudden, ca 10 cm.

Låt Spilerdugen flugta op-britsen till operatör sidan, så där är överhäng i modsatt sida till när ni ska förflytta pat från op-brits till säng.



Placera tvärlakanet så det täcker ifrån pat. bakdel och skuldror.

Låt mest möjligt av tvärlakanet hänga ut över op-brits bort från operatören, så ni kan dra i det när ni förflyttar pat tillbaka i säng.



Låt pat sätta sig på tvärlakanet/op-britsen utanför Spilerdugen.



Vik ut Spilerdugen under bakdelen genom att pat. vippar sig själv från sida till sida



Låt pat vända sig på siden för applicering av ryggmärgsbedövning.



Placera ett vikt Spilerdug under nersta bens vad och häl för lättare vändning retur till rygg samt positionering på op-brits.



Vänd pat retur till rygg och positionera pat på op-brits.



Ta bort Spilerdugen under vad och häl för att stabilisera personen under op.
Vik ev. Spilerdugen tillbaka upp under bakdelen om mera stabilisering behövs.

Förflyttning från OP-brits till säng



Låt pat vakna tillräckligt så att pat kan vara aktivt med i förflyttningen.

Placera vikt Spilerdug igen under vad och häl med överhäng av spilerdug ut mot säng



Kör sängen till brits och lägg Spilerdugarna och tvärlakanen över på sängen.

Sänk sängen under nivå med op-brits och op-brits lite snett intill sängen.



Glid pat över i säng genom att skjuva kroppen och dra i tvärlakanet.

Håll era ryggar så upprest som möjligt



Glid pat ben in i sängen och positionera pat innan man tar bort Spilerdug.

Ta bort Spilerdugen genom att glida den halvt in under pat och dra skiftesvis i kanterna på det nedersta lagret av Spilerdugarna i nivå med madrass.

Spilerdugsstorlekar 100 x min 175cm under kropp

100x 150cm under vad och hälar



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.

"Knäplastikoperation"

