


Lägga sig ner och sätta sig upp på röntgenbrits.

Vägledningen är exempel på hur man använder Spilerdug på Klinisk Fysiologisk Nuklearmedicinsk avdelning på Själlands Univercitetssjukhus.

Var uppmärksam på att man kan använda andra förflyttningsmetoder på andra sjukhus.

Från sittande till liggande på röntgenbrits.

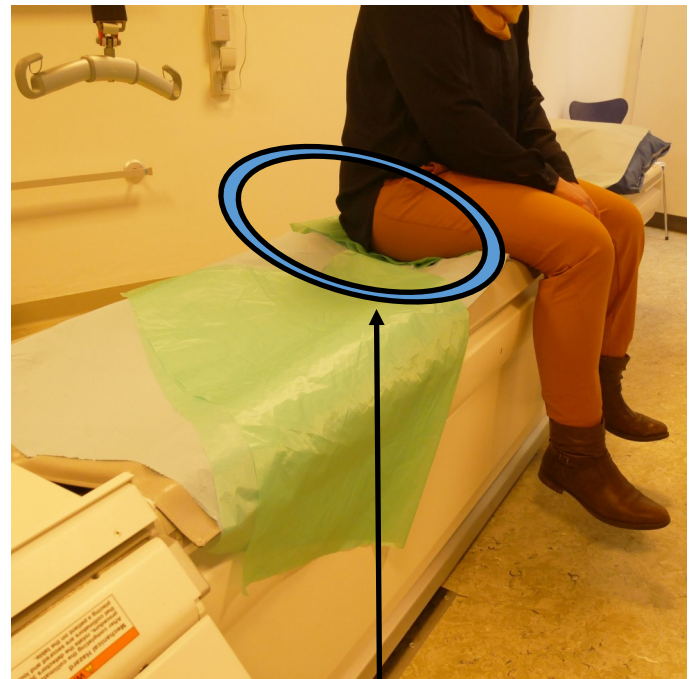

Placera 2 vikta spilerdug på röntgenbritsen.

Ett stycke till benen och ett stycke till kroppen.


Låt patienten sätta sig på spilerdugen till kroppen så tätt på kanten, som visas på bilden.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - info@spilerdug.dk - www.spilerdug.se



Be patienten om att ta tag i lyftbygeln.
Placera draglakan omkring patientens
vrster.

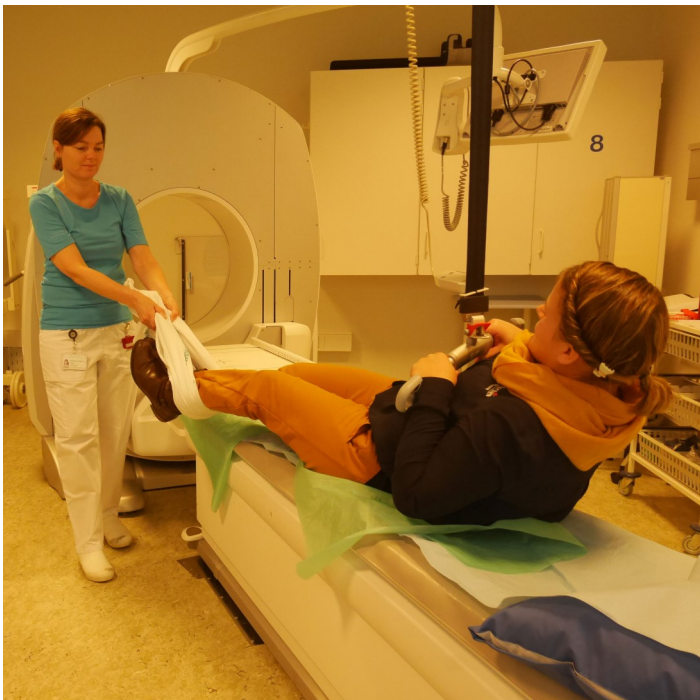

Grip om draglakanet med båda händerna.
Håll armarna sträckta och skulderna sänk-
ta under hela förflyttningen.
Gå baklänges tills benen glider in i sängen.
Patienten skal følge med i bevægelsen.



Låt patienten släppa lyftbygeln när per-
sonen ligger på röntgenbritsen.



Korrigerar patientens placering på röntgenbritten med spilerdug.

Låt patienten böja benen och trycka sig längre upp på röntgenbritten.

Spilerdugen förblir här under röntgen.

Från liggande till sittande på röntgenbrits.



Spilerdugen ligger under patienten från förflyttningen från sittande till liggande.

Om draglakanet inte är placerat om vristerna, så placerar du det.

Be patienten ta tag i lyftbygeln.



Höj lyftbygeln och be patienten om att följa med i rörelsen till sittande.



Låt patienten släppa lyftbygeln när patienten kommit till sittande ställning.

Grip om draglakanet med båda händerna.

Håll skuldrorna nere och armarna stadigt och gå baklänges tills benen kommit förbi britskanten.



Släpp efter i draglakanet med en gång när patientens fötter kommit förbi kanten.



Patienten sitter på britsen och kan nu resa sig från röntgenbritsen.



Spilderdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan.