

## Spiler+ - upp till sittande på sängkanten



I denna vägledning kan du se ett exempel på hur du kan använda Spiler+ long till sittande på sängkanten.

Du kan se videon på vår hemsida liksom du kan se flera vägledningar om hur du kan använda Spiler+.

Brehms Spilerdug ApS

+45 5764 8351 - [info@spilerdug.dk](mailto:info@spilerdug.dk) - [www.spilerdug.se](http://www.spilerdug.se)



Personen ligger på en Spiler+ Long med 2 stycken 150x100 spilerdug under.

Förflyttningen utförs av 2 hjälpare.




Glid upp Spilerdugen till lite före personens bakdel.



Vik in Spilerdugen längs med kroppen på den sida personen ska till.



Placera ett vikt stycke Spilerdug under personens närmaste underben och häls. Hjälpare 2 skapar plats.

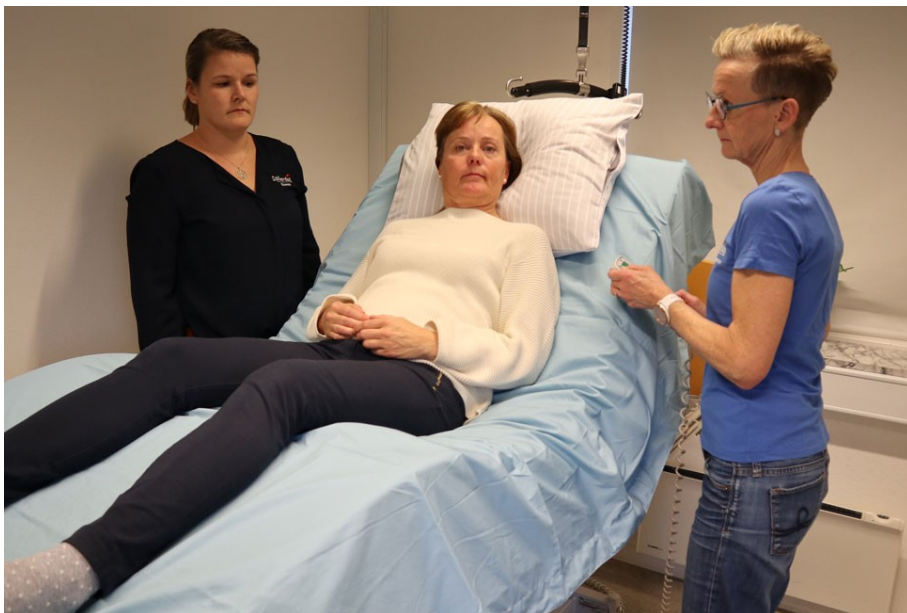


Ställ in sängen i komfortläge så att knädelen och ryggdelen höjs.



Koppla på lyftbygeln genom de 2 översta öglorna på var sida av Spiler+

Sänk sängen och höj lyften skiftvis i etapper tills ryggen släpper ifrån sängen.

Sänk ryggdelen.

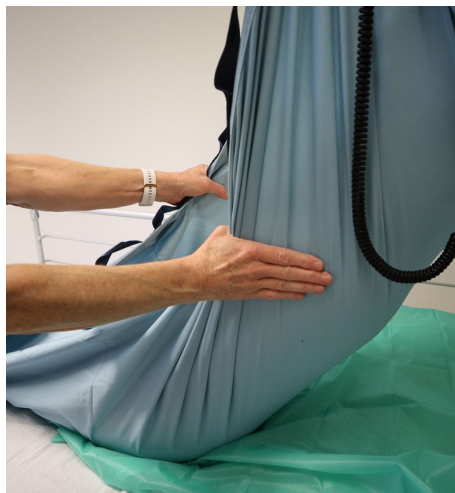

Hjälpare 1 tar tag i Spiler+ i höjd med personens skuldror.



Hjälpare 2 griper tag i Spiler+ i höjd med personens anklar och startar rörelsen. Vrid personen— rotera omkring bakdelen— genom att hjälpare 2 går baklänges och hjälpare 1 guidar överkroppen.



Hjälpare 2 tar bort Spilerdugen under benen och sänker sängen tills personen har kontakt med underlaget. Hjälpare 1 säkrar att personen har sittande balans innan lyften sänks.



Spilerdug är CE-märkt i enlighet med medicinskt direktiv 93/42 / EC och uppfyller standarden DS / EN 12182 2002-07-08 4: e upplagan. MDR EU No 2017/745



"Spiler+ - Upp till sittande på sängkanten" (Rev 001)